



signolux

ALARMKLOCKA

Bruksanvisning för Användare / Ordinator / Förskrivare – Installatör

A-2634-0

Gratulerar till köpet av din "Signolux Alarmklocka". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

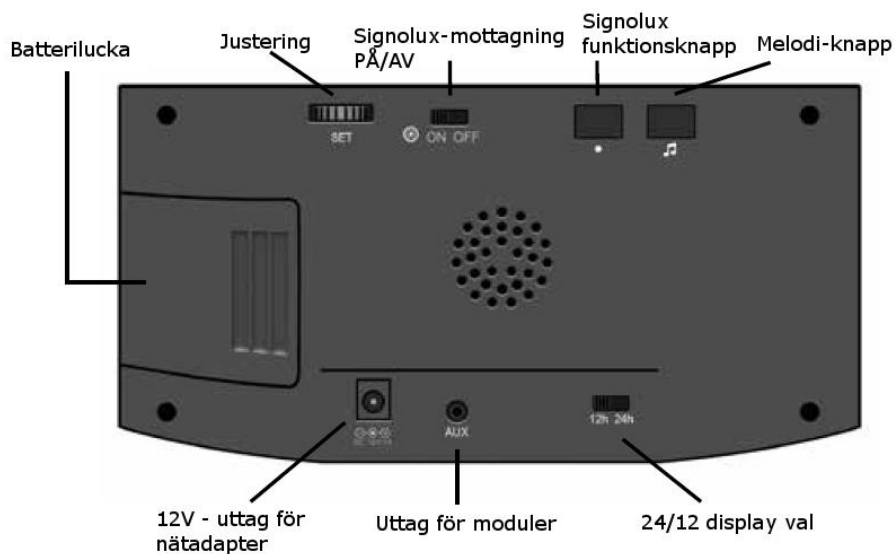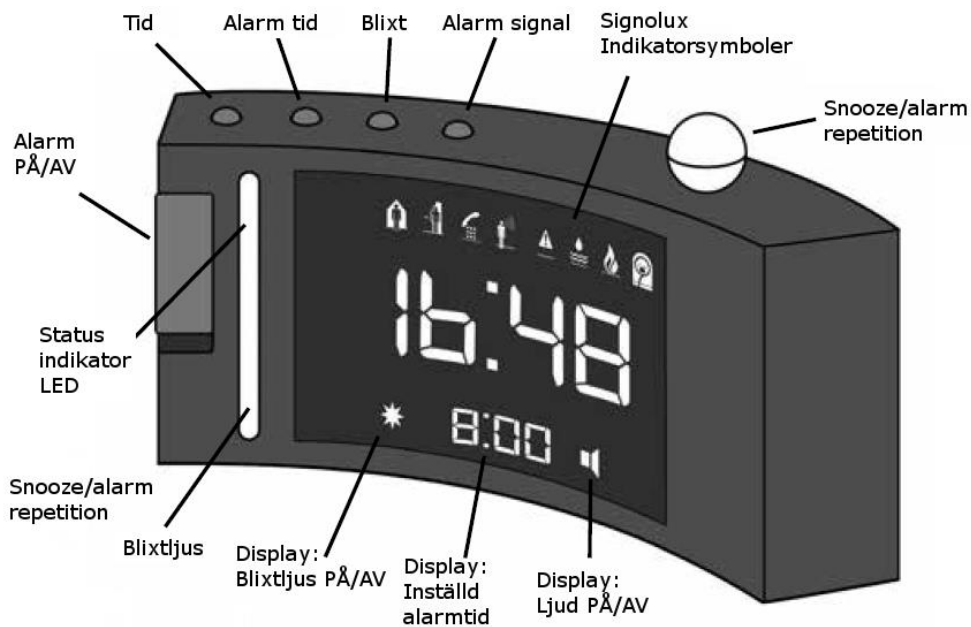

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Signolux mottagare Alarmklocka
- 12 volts nätadapter*
- Backupbatterier 4st*
- Sängvibrator*
- Manual
- Garantikort

**finns även som reservdel*


HANDHAVANDEBESKRIVNING


Så här kommer du igång och använda din enhet:

Komma igång


Anslut nätadaptern till enheten och sätt i den i ett vägguttag.


Ställa in tiden

För att ställa in tiden tryck på tid-knappen  i en sekund. Siffrorna som representerar timmar kommer att börja blinka. Ställ in önskad timme genom att vrida på Justerings-knappen som finns på baksidan av enheten. Tryck på tid-knappen igen.

 Nu kommer siffrorna som representerar minuter att börja blinka. Vrid Justerings-knappen för att ställa in rätt minut. Tryck ni igen på tid-knappen, nu visas rätt tid på klockan.

Ställa in alarm

 För att ställa in alarm tryck på alarm-knappen i en sekund. Siffrorna som visar timmar kommer att börja blinka. Ställ in önskad timme för larm genom att vrida på justerings-knappen.

 Tryck på alarm-knappen igen, nu kommer siffrorna för minuter att blinka. Ställ in önskad minut för larm genom att vrida på justerings-knappen. Tryck igen på alarm-knappen. Nu är alarmet inställt och displayen visar inställd alarmtid.


Alarm På/Av

Inställt alarm på viss tid kan stängas av med knappen på vänster baksida på klockan.


När den är i övre, grön position, (så att man ser grön markering) så betyder det att alarmet är PÅ.

När den är i nedre position så betyder det att alarmet är AV.


Ljud för Alarm På/Av

Tryck alarm signal-knappen  i en sekund för sätta på eller stänga av alarm ljud. Om alarm ljud är på så kommer en högtalarsymbol synas i displayen.

Justera ljudnivå för Alarm

Tryck och håll nedtryckt  alarm signal-knappen medans du justerar ljudet för alarm. Efter 2 sekunder kommer alarm ljudet att höras, fortsatt att hålla alarm signal-knappen nedtryckt samtidigt som du vrider på justerings-knappen för att hitta rätt läge. Släpp knappen när du är nöjd.

Justera Alarm ljudet, tonnivå.

Tryck ner och håll nedtryckt alarm-signal knappen  samtidigt som du håller nere den klotformade snooze knappen. Efter 2 sekunder kommer du höra en

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se



alarmton. Håll knapparna fotsatt nedtryckta och vrid justeringsknappen för att hitta rätt ton. Släpp knapparna när du är nöjd.

Blixtljus På / Av

Tryck och håll nedtryckt » * « blixtljusknappen i en sekund för att välja mellan PÅ eller AV. Om du kan se blixtljussymbolen i displayen så betyder det att blixtljus är på.

Ställa in ljusstyrka för display nattetid
Ljusstyrkan i displayen justeras automatiskt beroende på ljusförhållandena i rummet. Dagtid så lyser displayen med full styrka, när det blir mörkt aktiveras läget för display nattetid. För att välja ljusstyrka nattetid, tryck och håll nedtryckt blixtljusknappen » * « . Håll knappen nedtryckt och vrid justeringsknappen för att välja önskad ljusstyrka. Släpp knappen när du är nöjd. Om du gör denna inställning dagtid i ett ljust rum så kommer displayen att lysa fullt efter några sekunder.

Snooze funktion

Du kan avbryta ett inställt larm genom att trycka på snooze knappen. Alarmet kommer att repeteras efter 5 minuter.

Displayläge 12/24h

Tiden på klockan kan visas i form av 12 timmar eller 24 timmar. Valet mellan de två olika lägena kan göras med knappen 24/12-display val som finns på klockans baksida.

Strömförsörjning i händelse av strömavbrott

Denna enhet är utrustad med 4 st laddningsbara batterier av typ AAA. I händelse av ett strömavbrott kommer dessa att förse enheten med ström för att hålla tiden och förmedla varseblivningssignaler.
OBS! Vid ett strömavbrott så stängs blixtlampan av och displayen för tid är inte upplyst.

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna Alarmklocka/Väckarklocka är också en mottagare i Signolux-serien. Den väcker dig med en akustisk signal som är justerbar vad avser volym och ton. Som mottagare fungerar den med samtliga sändare i signolux-serien. En mottagen signal visas med blixt och/eller ljud och identifieras med 8 olika indikatorer i LED. Följande tillbehör kan anslutas till AUX utgången:

- Sängvibrator
- Blixtmodul
- Akustisk modul
-

SIGNOLUX MOTTAGAR FUNKTION

Denna alarmklocka är utrustad med alla funktioner som en Signolux-mottagare har. Mottagningsfunktion från sändare kan sättas på och av med » * « knappen på klockans baksida. Om mottagningsfunktion är påslagen kommer LED att lysas upp var 6:e sekund.

INSTÄLLNING OCH PROGRAMMERING

Programmering för olika symboler

Upp till 8 olika sändare kan kopplas till varje symbol. Detta uppnås genom att para sändarenheter med klockan.

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se



Tänk på att man endast kan para enheter som inte redan är parade med klockan för någon annan symbol. Om så är fallet behöver du ta bort den från den symbol som den redan är parad med för att på nytt lägga in den med ny symbol.

- Håll funktionsknappen nedtryckt. De olika symbolerna kommer att sekventiellt lysa upp på enheten. Släpp knappen när du ser aktuell symbol lysa upp.
- Utlös nu signalen för den aktuella symbolen, till exempel genom att trycka på dörrsändaren.
- Vänta i 20 sekunder, testa sedan att inställningen är gjord.

Ta bort sändare från minnet

Gör så här för att ta bort en sändare från enhetens minne.

- Håll funktionsknappen nedtryckt en stund. Symbolerna kommer att blinka sekventiellt. Släpp knappen så snart du ser den önskade symbolen.
- Tryck nu på funktionsknappen och melodiknappen »♪« tills alla symboler lysar upp.

OBS! Samtliga sändare kopplade till den aktuella ikonerna kommer att tas bort ur minnet.

Välja melodi för symboler

Du kan välja melodi / ljud för de olika symbolerna.








- Utlös aktuell sändare, till exempel tryck på dörrsändaren,
- Symbolen för den sändare du utlöst kommer att lysa upp och den inställda melodin spelas upp.
- Vänta tills symbolen börjar blinka.
- Tryck på melodiknappen tills du har funnit det önskade ljudet (du

kan välja mellan 15 olika melodier/ljud).

- När en symbol slutar att blinka, har den valda melodin blivit inställd.

Innebörd i olika symboler

Varje symbol kan kopplas till sändare och kan bli parad med denna. Symbolerna står för:

-  Dörrklocka 1, grönt ljus
-  Dörrklocka 2, grönt ljus
-  Telefon, orange ljus
-  Personanrop, gult ljus
-  Babyalarm, vitt ljus
-  Brandalarm, rött ljus
-  Vattenalarm, blått ljus
-  Alarm, rött ljus

KONTROLLERA SENASTE SIGNAL & BEKRÄFTA SIGNAL

Genom att trycka på funktionsknappen kan den senaste signalen visas igen. Du kan också bekräfta / kvittera en inkommen signal genom att trycka på funktionsknappen eller snooze knappen.

SE BATTERISTATUS FÖR SÄNDARE

Alarmklockan kan informera om statusen på de sändare som är parade med enheten. Den röda status LED lampan är placerad i den övre delen av blyxtlampan. Vid låg batterinivå för en sändare så indikeras detta genom att den röda lampan lyser tillsammans med symbolen för den sändare som har dåligt batteri när signal är utlöst. Byt batterier så snart som möjligt.

ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

dammtrasa. Använd aldrig starka rengöringsmedel på enheten.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

ÅTERVINNING



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.

TEKNISK DATA

Strömförsörjning:	230V, 50Hz; 12V DC 1000mA
Strömförbrukning:	cirka 2W
Höjd:	103 mm
Bredd:	212 mm
Djup:	70 mm
Vikt:	337g



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se