

signolux

## DÖRRSÄNDARE

Bruksanvisning för Användare

A-2657-0

Gratulerar till köpet av din "Signolux Dörrsändare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.



### DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:


- Tryckknappsändaren
- Batteri (CR2032)
- Montagedetaljer för fastsättning
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.

### HANDHAVANDEBESKRIVNING

Första gången du använder enheten behöver du sätta i det medföljande batteriet. Placera sändaren på en slät


arbetsyta, positionera rotationsaxeln (a och c) med den transparenta plasten emot dig.

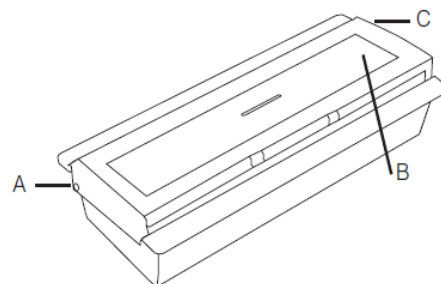

Använd ett spetsigt verktyg för att försiktigt trycka in den lilla pluggen (a). Nu kan du trycka upp det transparenta locket. Du kan nu, med en liten skruvmejsel, skruva loss främre delen av sändaren. Här ser du platsen för batteriet. Se bild.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

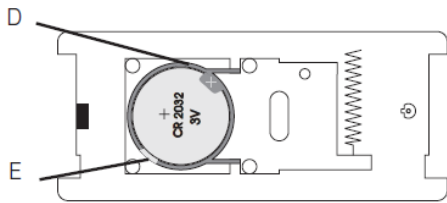

Om du ska ersätta ett gammalt batteri börjar du med att ta bort det gamla. Var noga med att se till att det blir rätt polaritet på positioneringen av batteriet.

#### *Namn på knapp*

Öppna det transparenta locket på så sätt som beskrivs ovan. Det transparenta locket består av två delar. Lappen (94\*24mm) där man skriver namn skall placeras emellan de två delarna som hålls ihop av en enkel snäppfunktion. Tänk på att lappen inte skall ha en utformning som gör att den helt täcker ljuset bakom namnskylten.

#### **ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS**

Första gången du använder enheten måste den paras ihop med samtliga mottagare som den skall kommunicera med. Har du fått ditt varseblivningssystem förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så har installationen med stor sannolikhet ingått. Om inte så har du fått tillgång till den manual som är avsedd för ordnatörer och installatörer. I denna beskrivs mer utförligt hur man parar nya enheter till systemet. Tänk också på att byggnadsdetaljer kan störa signaleringen, så testa därför alltid enheten innan du sätter fast den i en ny position.

#### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Denna sändare skickar en signal till din mottagare som ger dig varseblivning när någon trycker på sändaren. Mottagaren

ger dig varseblivning via akustisk, visuell eller taktisk signal (beroende på vilken typ av mottagare du har). Denna är en direktsändare som dörrklocka. Det betyder att den inte skickar någon signal till befintlig dörrklocka.

#### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.



TEKNISKA DATA	
Strömförsörjning:	3x AAA batterier 1,5v
	Eller
	230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
Höjd	75mm
Bredd	122mm
Djup	38mm
Vikt	128g (exkl. batterier)
Sändningsfrekvens	868,35MHz
Stand-by	1-2 år



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humantechnik.se](http://www.humantechnik.se)

## DÖRRSÄNDARE

Bruksanvisning för Förskrivare / Ordinatörer, Installatörer

A-2657-0

Gratulerar till köpet av din "Signolux Dörrsändare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.



### DELAR SOM INGÅR I ENHETEN / RESERVDELAR

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:


- Tryckknappsändaren
- Batteri (CR2032)\*
- Montagedetaljer för fastsättning\*
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.

*\*finns även som reservdel*

### HANDHAVANDEBESKRIVNING

Första gången du använder enheten behöver du sätta i det medföljande batteriet. Placera sändaren på en slät arbetsyta, positionera rotationsaxeln (a och c) med den transparenta plasten emot dig.

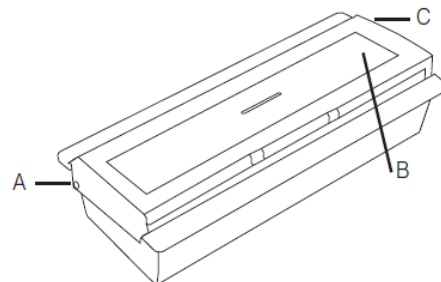


Använd ett spetsigt verktyg för att försiktigt trycka in den lilla pluggen (a). Nu kan du trycka upp det transparenta locket.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

Du kan nu, med en liten skruvmejsel, skruva loss främre delen av sändaren. Här ser du platsen för batteriet. Se bild.

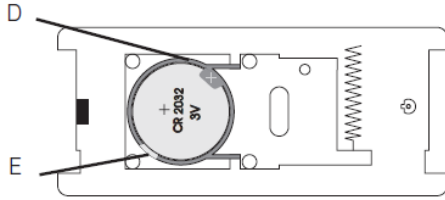

Om du ska ersätta ett gammalt batteri börjar du med att ta bort det gamla. Var noga med att se till att det blir rätt polaritet på positioneringen av batteriet.

#### *Namn på knapp*

Öppna det transparenta locket på så sätt som beskrivs ovan. Det transparenta locket består av två delar. Lappen (94\*24mm) där man skriver namn skall placeras emellan de två delarna som hålls ihop av en enkel snäppfunktion. Tänk på att lappen inte skall ha en utformning som gör att den helt täcker ljuset bakom namnskylten.

#### **ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS**

Första gången du använder enheten måste den paras ihop med samtliga mottagare som den skall kommunicera med. Har du fått ditt varseblivningssystem förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så har installationen med stor sannolikhet ingått. Om inte så har du fått tillgång till den manual som är avsedd för datorer och installatörer. I denna beskrivs mer utförligt hur man parar nya enheter till systemet. Tänk också på att byggnadsdetaljer kan störa signaleringen, så testa därför alltid enheten innan du sätter fast den i en ny position.

#### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSMÅL**

Denna sändare skickar en signal till din mottagare som ger dig varseblivning när någon trycker på sändaren. Mottagaren ger dig varseblivning via akustisk, visuell eller taktisk signal (beroende på vilken typ av mottagare du har). Denna är en direktsändare som dörrklocka. Det betyder att den inte skickar någon signal till befintlig dörrklocka.

#### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

#### **MONTERINGSANVISNINGAR**

Använd den medföljande vidhäftningsanordningen för att fästa tryckknappen på valt ställe. Testa att mottagning fungerar som planerat innan du sätter fast den i väggen. Se till att det är rent och torrt på platsen för monteringen.

#### **FELSÖKNINGSGUIDE**

<i>Fel</i>	<i>Åtgärd</i>
Ingen signal sänds	Kontrollera om batteriets polaritet har placerats korrekt. Kontrollera om batteriet är svagt. Byt ev. batteriet. Kontrollera om mottagaren fungerar som den ska

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)



## PARA ENHETEN MED MOTTAGARE

För att enheten skall fungera med mottagarna som används behöver du para ihop enheterna. Tryck ner funktionsknappen på mottagarenheten. Du kommer att se de olika symbolerna lysa upp. Släpp knappen när önskad symbol lyser upp, till exempel dörrsymbolen. Tryck sedan på dörrsändarens knapp. Vänta i 20 sekunder och kontrollera därefter om mottagaren registrerar dörrknapp tryck.

TEKNISKA DATA	
Strömförsörjning:	3x AAA batterier 1,5v
	Eller
	230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
Höjd	75mm
Bredd	122mm
Djup	38mm
Vikt	128g (exkl. batterier)
Sändningsfrekvens	868,35MHz
Stand-by	1-2 år



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humantechnik.se](http://www.humantechnik.se)