




signolux

## STANDARD MOTTAGARE

Bruksanvisning för Användare

A-2614-0

**Gratulerar till köpet av din "Signolux Standardmottagare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.**

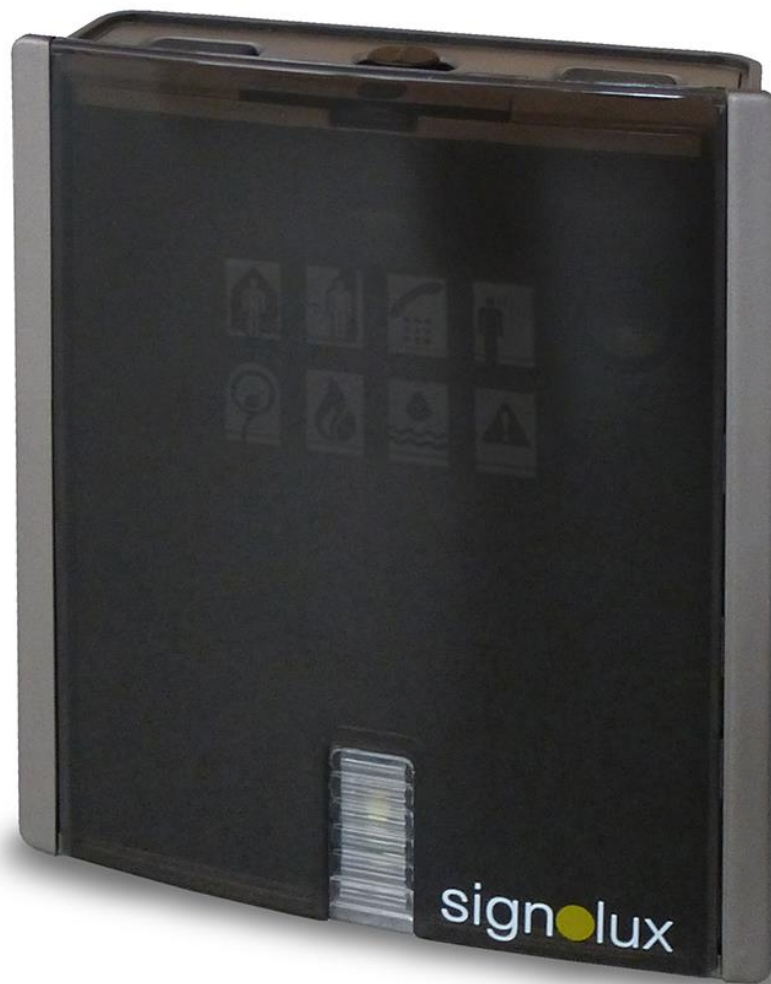

För mer information besök vår hemsida.  
[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

## DELAR SOM INGÅR I ENHETEN


I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Mottagarenheten
- 4 x batteri LR14
- Montagedetaljer för fastsättning
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.

## HANDHAVANDEBESKRIVNING


För att byta batterier, eller sätta i batterier första gången du använder enheten gör du följande; på enhetens baksida finner du batteriluckan som försiktigt trycks nedåt. Se bild:

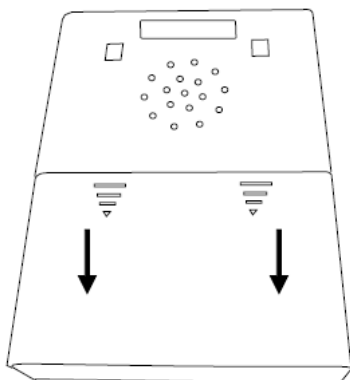

När batteriluckan är öppen sätter du i batterierna, 4 st av typen LR14 (även kallade C batterier). Försäkra dig om att batterierna hamnar med rätt polaritet. Stäng batteriluckan genom att försiktigt trycka tillbaka den i dess orginalläge.

## ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

Med denna enhet kan du anpassa signaleringsläget med knappen som finns på enhetens ovansida. Se bild.

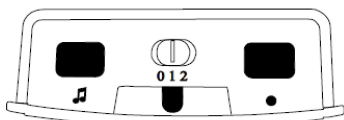


*Att välja signalerings läge.*

Knappen för signaleringsläge kan placeras i tre olika positioner ("0, 1, 2") det är med denna knapp du väljer mellan olika typer av signalering. Kom ihåg att symbolerna alltid visas med färgad belysning.

- Position 0=Akustisk ej visuell
- Position 1=Akustisk och visuell
- Position 2=Visuell ej akustisk

*Enhetens symboler*

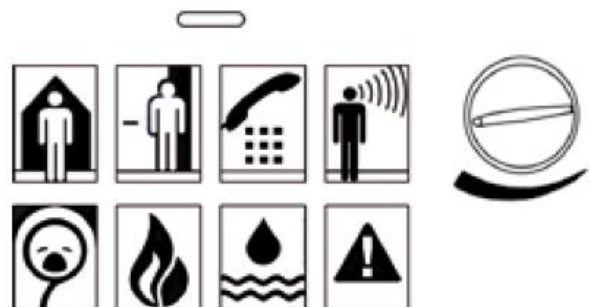

Symboler, kontrollampa och volymkontroll.

Varje symbol är kopplad till en sändare, (tex. Dörr, telefon osv) och kan programmeras om.

Dörr 1	Färg: Grön
Dörr 2	Färg: Grön
Telefon	Färg: Orange
Person anrop	Färg: Gul
Baby larm	Färg: Vit
Brandlarm	Färg: Röd
Fuktlarm	Färg: Blå
Alarm	Färg: Röd

*Ställa in volym*

På framsidan av enheten finns en front som kan lossas genom att trycka den försiktigt uppåt efter det att man har lossat på låset som sitter upptill på enheten. Bakom fronten finner du volymkontrollen där du ställer in volym.

**WARNING! Denna enhet kan avge ljudsignal på upp till 90dB!** För att skydda

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

din hörsel, börja med en låg nivå och testa dig fram för att nå önskad ljudnivå.

#### *Välja melodi*

Du kan välja melodi (akustisk signal) för varje symbol.

- Utlös sändarsignalen, till exempel dörrsändaren.
- Symbolen för utlöst sändare kommer att lysa upp och den inställda signalen spelas upp.
- Vänta till symbolen blinkar.
- Tryck och håll nere melodiknappen på enhetens översida i två sekunder. Släpp knappen och tryck ner den upprepade gånger tills du har funnit den melodi du vill ha för önskad ikon. Du kan välja mellan 15 olika melodier.
- När symbolen slutar blinka, har en melodi valts.

#### *Indikering av batterinivå*


Mottagaren informerar om status på batterier hos mottagaren och hos sändarna.

- God batterinivå hos mottagaren indikeras genom att den röda lampan blinkar var 5-6e sekund.
- Låg batterinivå hos mottagaren indikeras med att den röda lampan blinkar i korta sekvenser, en gång per sekund. Byt batterier snarast.
- Låg batterinivå hos sändare indikeras med att den röda lampan lyser tillsammans med symbolen för aktuell sändare när signal är utlöst. Vänligen byt batterier hos sändaren så snart som möjligt.

#### *Kontrollera senaste signal, avfärda nuvarande signal.*

Genom att trycka på knappen med en lite punkt kan senaste registrerade signal visas igen. Du kan också "ta bort" en signal som just aktiverats genom att trycka på denna knapp.

AUX-port och extern strömförsörjning  
AUX-porten och koppling till extern strömförsörjning finns på enhetens ena sida. Alla enheter från Humanteknik kan kopplas via AUX-porten (ex. sängvibrator)

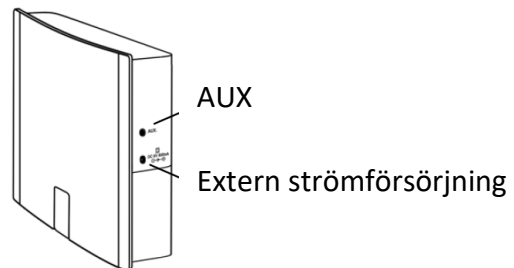

#### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Denna mottagare signalerar via ljussignal och/eller ljudsignal när sändare i samma system skickar signal till den. Upp till 8 olika sändare kan integreras i systemet. Om till exempel en besökare trycker på dörrsändaren, så skickas en radiosignal till mottagaren. Denna signalerar att signalen mottagits akustiskt och visuellt. Hur man parar en sändarenhet med denna mottagare framgår av den mer omfattande manualen för installatörer och ordinatorer.

#### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.



Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

### ÅTERVINNING



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.

#### TEKNISK DATA

Används inom temperaturområde	0 till 40 grader C
Ljudvolym	upp till 90dB på 1m
Batterier	4* LR14
Batterier livslängd	12 månader
Extern strömkälla	6V/ 800mA
Dimensioner (HxWxD)	144*114*41 mm
Vikt	296 g



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)




signolux

## STANDARD MOTTAGARE

Bruksanvisning för Ordinator / Förskrivare - Installatör

A-2614-0

**Gratulerar till köpet av din "Signolux Standardmottagare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.**

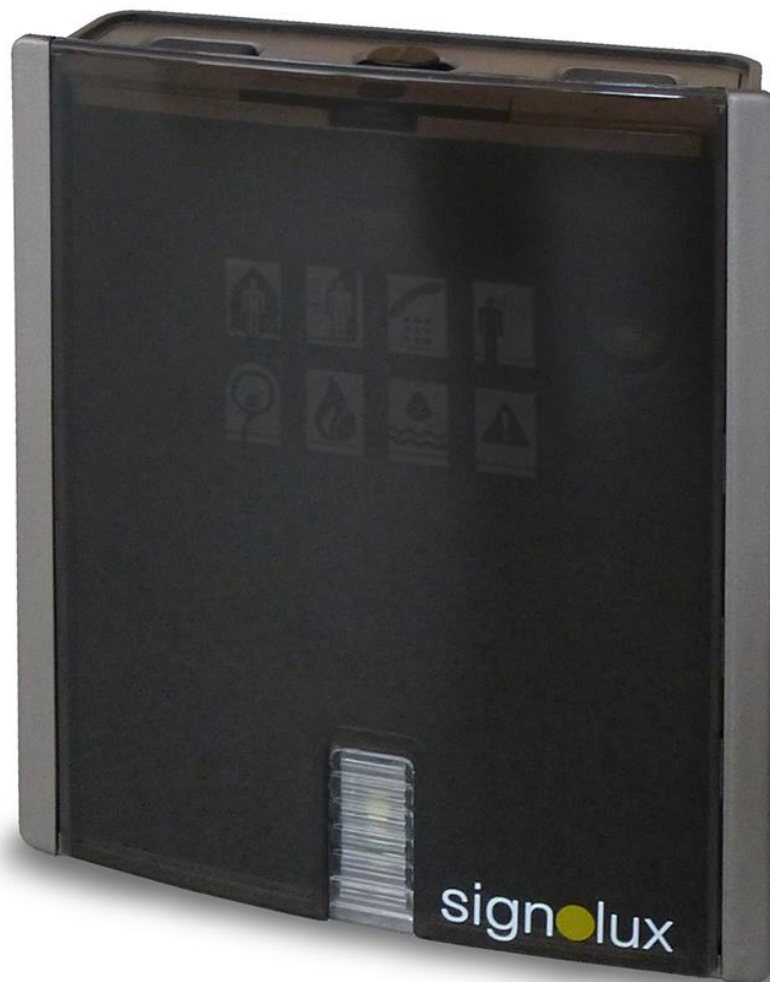

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

## DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Mottagarenheten
- 4 x batteri LR14\*
- Montagedetaljer för fastsättning\*
- Användarmanual
- Garantikort


Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående. Dessa delar kan också beställas som reservdelar.

*\*finns även som reservdel*

## HANDHAVANDEBESKRIVNING

För att byta batterier, eller sätta i batterier första gången du använder enheten gör du följande; på enhetens baksida finner du batteriluckan som försiktigt trycks nedåt.


Se bild:

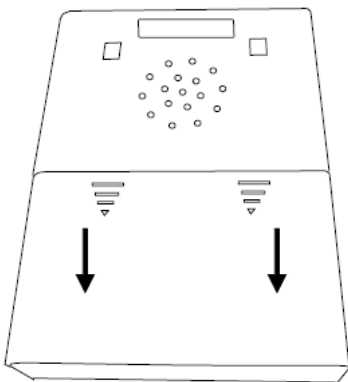

När batteriluckan är öppen sätter du i batterierna, 4 st av typen LR14 (även kallade C batterier). Försäkra dig om att batterierna hamnar med rätt polaritet. Stäng batteriluckan genom att försiktigt trycka tillbaka den i dess originalläge.

## ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

Med denna enhet kan du anpassa signaleringsläget med knappen som finns på enhetens ovansida. Se bild.

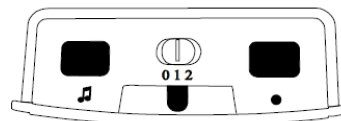


*Att välja signalerings läge.*

Knappen för signaleringsläge kan placeras i tre olika positioner ("0, 1, 2") det är med denna knapp du väljer mellan olika typer av signalering. Kom ihåg att symbolerna alltid visas med färgad belysning.

- Position 0=Akustisk ej visuell
- Position 1=Akustisk och visuell
- Position 2=Visuell ej akustisk

## Enhetens symboler

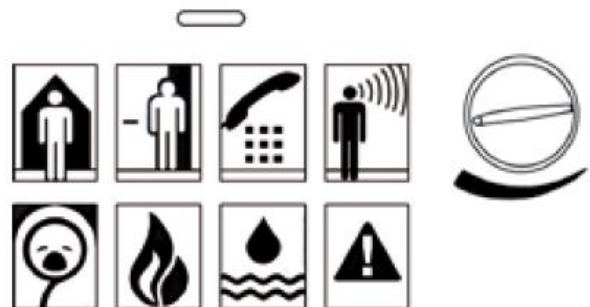

Symboler, kontrollampa och volymkontroll.

Varje symbol är kopplad till en sändare, (tex. Dörr, telefon osv) och kan programmeras om.

Dörr 1	Färg: Grön
Dörr 2	Färg: Grön
Telefon	Färg: Orange
Person anrop	Färg: Gul
Baby larm	Färg: Vit
Brandlarm	Färg: Röd
Fuktlarm	Färg: Blå
Alarm	Färg: Röd

## Ställa in volym

På framsidan av enheten finns en front som kan lossas genom att trycka den försiktigt uppåt efter det att man har lossat på låset som sitter upptill på



enheten. Bakom fronten finner du volymkontrollen där du ställer in volym.

**VARNING! Denna enhet kan avge**

**ljusignal på upp till 90dB!** För att skydda din hörsel, börja med en låg nivå och testa dig fram för att nå önskad ljudnivå.

*Val av signaler per sändarikon.*

Upp till 8 sändare kan kopplas till varje symbol. Denna koppling kan uppnås genom att para enheterna. Tänk på att en sändare endast kan paras om den inte är känd i minnet hos mottagaren. Om det behövs kan man behöva rensa sändaren från mottagarens minne. (se nedan)

- a. Håll knappen med en liten prick under nedtryckt en kort tid. Symbolerna kommer att sekventiellt blinka. Släpp knappen när du ser önskad symbol.
- b. Utlös nu den signal på sändare som du önskar matcha symbolen, till exempel tryck på dörrsändaren.
- c. Vänta i ca 20 sekunder innan du testar.

*Välja melodi*

Du kan välja melodi (akustisk signal) för varje symbol.

- f. Utlös sändarsignalen, till exempel dörrsändaren.
- g. Symbolen för utlöst sändare kommer att lysa upp och den inställda signalen spelas upp.
- h. Vänta till symbolen blinkar.
- i. Tryck och håll nere melodiknappen på enhetens översida i två sekunder. Släpp knappen och tryck ner den upprepade gånger tills du har funnit den melodi du vill ha för önskad ikon. Du kan välja mellan 15 olika melodier.

- j. När symbolen slutar blinka, har en melodi valts.

*Rensa minnet från en parad enhet*

Gör det följande om du önskar ta bort en parad enhet från mottagarens minne.

- a. Håll knappen med en liten prick under nedtryckt en kort tid. Symbolerna kommer att sekventiellt blinka. Släpp knappen när symbolen för den parade enheten som du vill rensa från minnet lyser.
- b. Tryck nu på knappen med en liten prick under samtidigt som du trycker ner melodiknappen. Gör detta tills du ser att alla symboler på mottagaren blinkar till.

Tänk på att alla sändare för vald symbol försvinner ur minnet.

*Indikering av batterinivå*

Mottagaren informerar om status på batterier hos mottagaren och hos sändarna.

- God batterinivå hos mottagaren indikeras genom att den röda lampan blinkar var 5-6e sekund.
- Låg batterinivå hos mottagaren indikeras med att den röda lampan blinkar i korta sekvenser, en gång per sekund. Byt batterier snarast.
- Låg batterinivå hos sändare indikeras med att den röda lampan lyser tillsammans med symbolen för aktuell sändare när signal är utlöst. Vänligen byt batterier hos sändaren så snart som möjligt.


*Kontrollera senaste signal, avfärda nuvarande signal.*

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

Genom att trycka på knappen med en lite punkt kan senaste registrerade signal visas igen. Du kan också "ta bort" en signal som just aktiverats genom att trycka på denna knapp.

AUX-port och extern strömförsörjning  
AUX-porten och koppling till extern strömförsörjning finns på enhetens ena sida. Alla enheter från Humanteknik kan kopplas via AUX-porten (ex. sängvibrator)

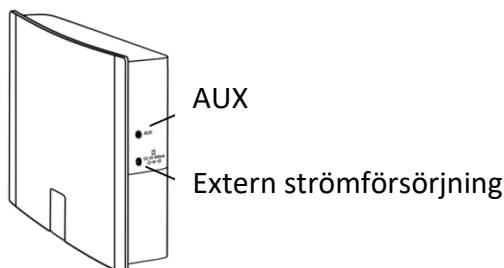

### SYFTE OCH ANVÄNDINGSOMRÅDE

Denna mottagare signalerar via ljussignal och/eller ljudsignal när sändare i samma system skickar signal till den. Upp till 8 olika sändare kan integreras i systemet. Om till exempel en besökare trycker på dörrsändaren, så skickas en radiosignal till mottagaren. Denna signalerar att signalen mottagits akustiskt och visuellt.


### ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

### MONTERA ENHETEN

Mottagaren kan monteras fast eller användas som fristående enhet. För fast montage använd medföljande infästningsanordning.

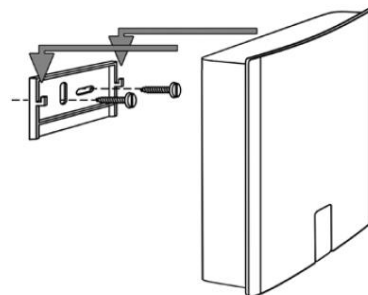

### ÅTERVINNING



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.





FEL	ORSAK	LÖSNING
Det hörs ett pip när man parar enheterna	Sändaren som du försöker para med mottagaren är redan kopplad till mottagaren.	Se manualen hur man raderar minnet hos mottagaren.
Det hörs två pip efter en normal ringsignal.	Detta indikerar låg batterinivå hos aktuell sändare.	Sätt i nya batterier i sändaren.
Mottagaren fungerar inte	Försäkra dig om att batterierna har satts i på korrekt sätt.	Försäkra dig om att polariteten på batterierna har hamnat korrekt.
	Kontrollera om rätt batterier, LR14 "C"-batterier, används	Använd endast alkaline batter
	Det kan vara så att sändare inte har parats med mottagaren	Försök använda sändaren eller mottagaren på en alternativ plats.
Det hörs ingen ringsignal	Byt position (2) på signaleringsknappen.	Kontrollera positionen på signaleringsknappen.
		Kontrollera volymkontrollen.
Blixtljuset fungerar inte	Byt position (0) på signaleringsknappen.	Kontrollera positionen på signaleringsknappen.
Räckvidden är begränsad	Metall eller annat byggnadsmaterial kan reducera räckvidden.	Om möjligt placera inte sändare eller mottagare på eller i närheten av metallföremål.
	Övrig utrustning i hemmet kan störa enhetens radiosignal.	
	Väggar och tak kan begränsa enhetens sändare.	
	Lågt batteri kan påverka enhetens räckvidd.	Byt batterier var 12-18e månad.

#### TEKNISK DATA

Används inom temperaturområde	0 till 40 grader C
Ljudvolym	upp till 90dB på 1m
Batterier	4* LR14
Batterier livslängd	12 månader
Extern strömkälla	6V/ 800mA
Dimensioner (HxWxD)	144*114*41 mm
Vikt	296 g



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)