

## TELEFON SÄNDARE, FAST TELEFONI

Bruksanvisning för Användare

Gratulerar till köpet av din "Signolux Telefonsändare för fast telefoni". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

Bild 1: Framsidan


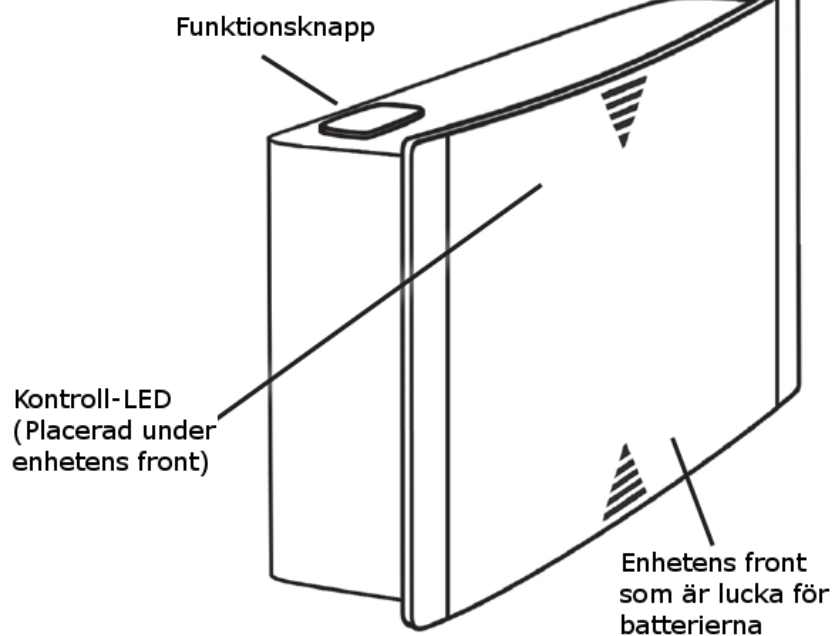


Bild 2: Undersidan

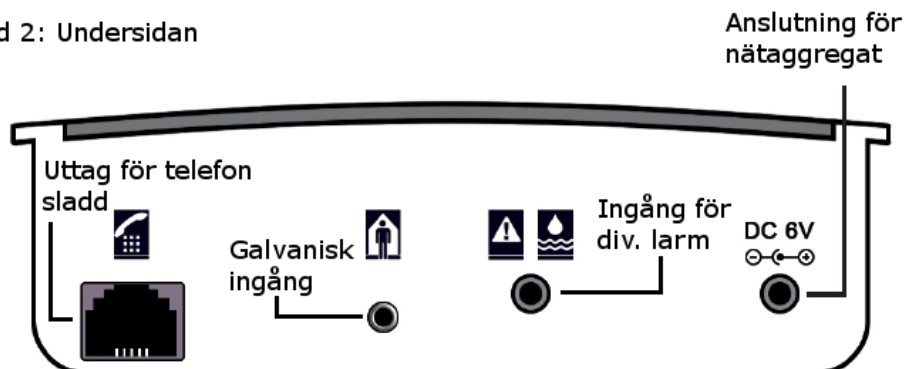

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

### DELAR SOM INGÅR I ENHETEN


I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Sändarenheten
- 3x batteri typ AAA
- Mellanpropp och modularkontakt
- Tillbehör för galvanisk koppling
- Montagedetaljer för fastsättning
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.


### HANDHAVANDEBESKRIVNING

Första gången du använder enheten behöver du sätta i de medföljande batterierna. Börja med att ta bort den främre fronten på enheten för att få tillgång till batteriernas placering. Tryck den främre fronten uppåt. (Se Bild)

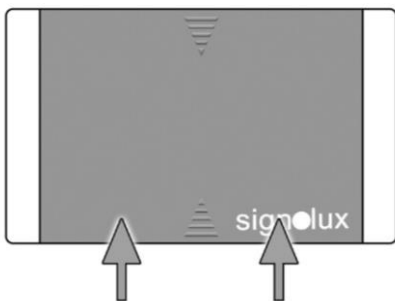


När fronten har flyttats en bit upp kan den tas bort och batterierna kan placeras i dess fack.

OBS! Var noga med att placera batterierna med rätt. (Se Bild)

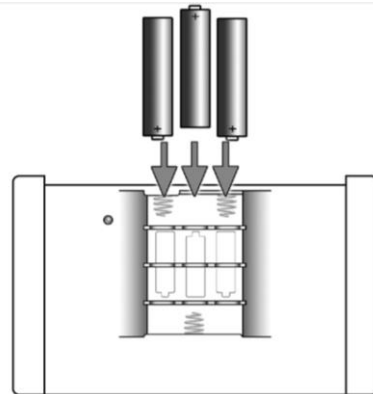

När du har satt i batterierna placerar du fronten på enheten, lämna cirka en centimeter nertill på enheten. (se Bild)

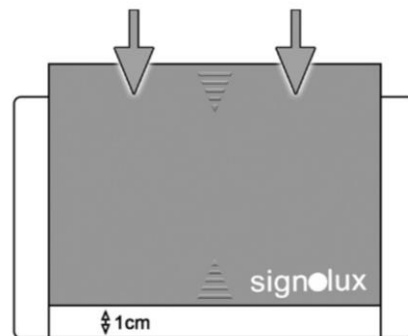

Tryck ner fronten tills du hör ett klick. Nu är fronten i sin ordinarie position.

### ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

Första gången du använder enheten måste den paras ihop med samtliga mottagare som den skall kommunicera med. Har du fått ditt varseblivningssystem förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så har installationen med stor sannolikhet ingått.

Om inte så har du fått tillgång till den manual som är avsedd för datorer och installatörer. I denna beskrivs mer utförligt hur man parar nya enheter till systemet.



Denna sändare kan användas för flertal olika ändamål. Den kan kopplas in direkt mot en befintlig dörrklocka, användas som sändare för telefon, kopplas till porttelefon eller larm osv.

Tänk också på att byggnadsdetaljer kan störa signaleringen, så testa därför alltid enheten innan du sätter fast den i en ny position.

#### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Denna sändare reagerar på signaler som tillförts via en koppling. Denna kan vara tillförd via telekabeln, eller de galvaniska kontakterna. Du kan koppla mot larm eller andra enheter. Tänk på att inkopplingen av olika produkter kräver fackmässighet. Försök aldrig göra anpassningar på egen

hand. Vänd dig till din dator / förskrivare eller återförsäljare.

#### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

TEKNISKA DATA	
Strömförsörjning:	3x AAA batterier 1,5v
	Eller
	230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
Höjd	75mm
Bredd	122mm
Djup	38mm
Vikt	128g (exkl. batterier)
Sändningsfrekvens	868,35MHz
Stand-by	1-2 år



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humantechnik.se](http://www.humantechnik.se)

## TELEFON SÄNDARE, FAST TELEFONI

Bruksanvisning för Ordinator / Installatör

A-2655-0

Gratulerar till köpet av din "Signolux Telefonsändare för fast telefoni". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

Bild 1: Framsidan


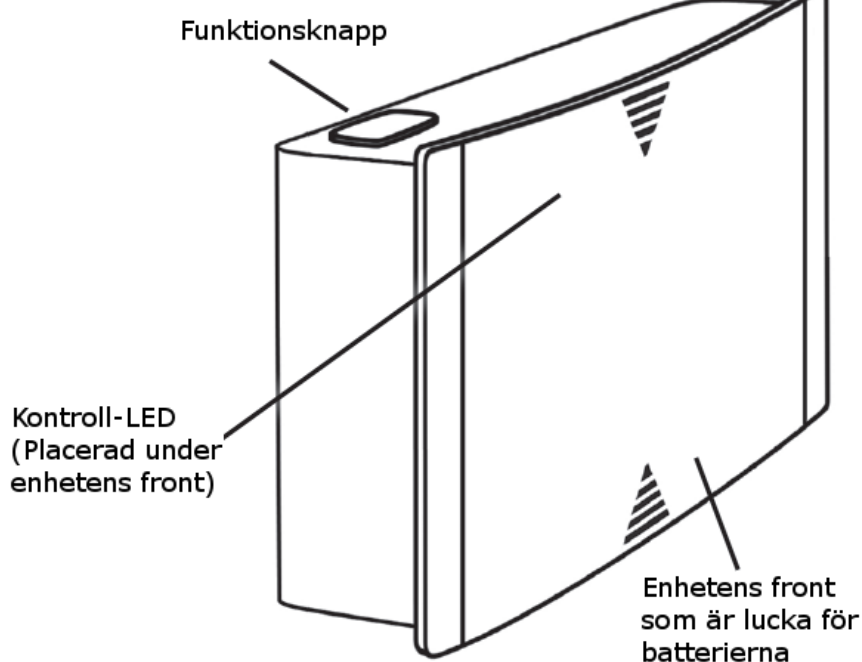


Bild 2: Undersidan

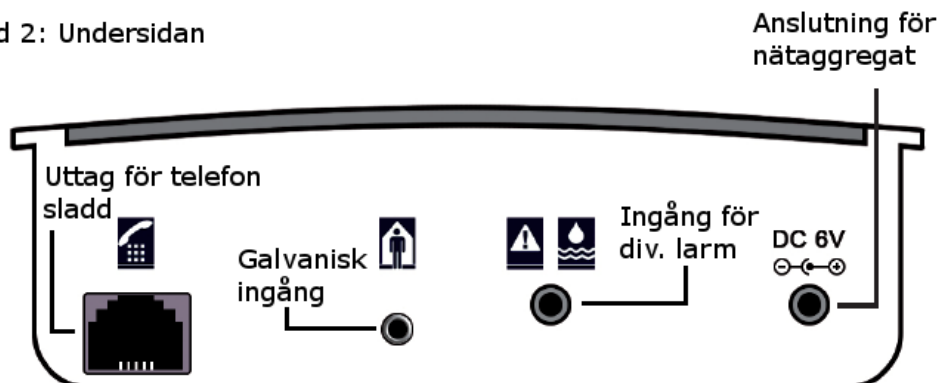

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

## DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:


- Sändarenheten
- 3x batteri typ AAA\*
- Mellanpropp och modularkontakt\*
- Tillbehör för galvanisk koppling\*
- Montagedetaljer för fastsättning\*
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.

*\*finns även som reservdel*


## HANDHAVANDEBESKRIVNING

Första gången du använder enheten behöver du sätta i de medföljande batterierna. Börja med att ta bort den främre fronten på enheten för att få tillgång till batteriernas placering. Tryck den främre fronten uppåt. (Se Bild)

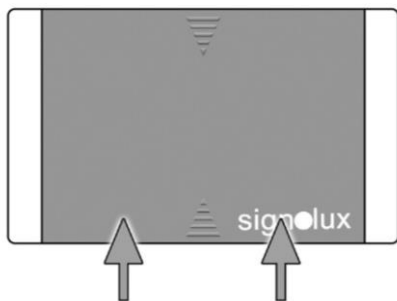


När fronten har flyttats en bit upp kan den tas bort och batterierna kan placeras i dess fack.

OBS! Var noga med att placera batterierna med rätt. (Se Bild)

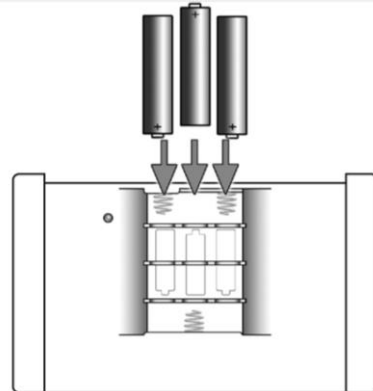

När du har satt i batterierna placerar du fronten på enheten, lämna cirka en centimeter nertill på enheten. (se Bild)

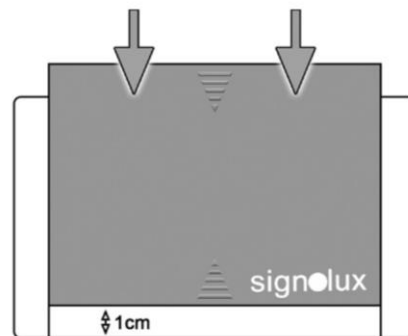

Tryck ner fronten tills du hör ett klick. Nu är fronten i sin ordinarie position.

## ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

Första gången du använder enheten måste den paras ihop med samtliga mottagare som den skall kommunicera med. Det är när du parar enheterna som du definierar vilken signaltyp den skall indikera som.

### *Para ihop enheter.*

För att para ihop sändare och mottagare så trycker du och håller nere funktionsknappen på mottagaren. Indikering roterar då mellan olika typer av sändarsignal som lyser upp på mottagarenheten. Släpp funktionsknappen så snart du ser att den aktuella indikeringen för aktuell sändare lyser upp. Tryck därefter på funktionsknappen på sändarenheten. Vänta sedan i cirka 20 sekunder innan du gör en test genom att trycka på sändarens funktionsknapp, den kommer då att skicka en signal till mottagaren som indikerar vald sändartyp. Varje symbol kan ha upp till 8 olika sändare kopplad till sig.

### *Set up för Telefonsändare*

Sätt i telekabeln i uttaget för denna på enhetens undersida, se bild. Sätt i kabeln i mellanproppen. Sätt i mellanproppen i teleuttaget. OBS! Använd endast den kabel och mellanpropp som medföljer produkten. Para sändaren med de enheter för mottagning som används enligt anvisning.

### *Använda Galvanisk ingång*

Denna sändare kan också triggas av annan händelse, till exempel porttelefonsändare. Detta kopplas in via den galvaniska ingången. Denna reagerar på ingångsspänning av minst 3 och max 15 volt. Det är möjligt att ansluta enheten till

antingen alternerande eller likspänning. Enheten kan kopplas mot en mängd olika lågspännings system så som dörrklockor, porttelefoner, etc.

Så här kopplar du in:

Koppla in medföljande galvaniska kontakt i uttaget, koppla in de kablarna mot önskad enhet. Para sändaren med de mottagarenheter som används enligt anvisning.

**Mycket viktigt!** Den galvaniska kontakten är designad för lågvoltssystem. Den får inte kopplas mot system över 15V. Om du är osäker, konsultera en behörig elektriker. Felaktig installation kan orsaka skada på person och produkt.

### *Koppla mot olika alarm*

Uttag för div larm är avsedd för att kopplas till larm med sluten krets som utlösare. Detta kan vara golvmattor, alarmknapp, vatten-sensor alarm, osv.

Tänk också på att byggnadsdetaljer kan störa signaleringen, så testa därför alltid enheten innan du sätter fast den i en ny position.

## SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna sändare registrerar på telefonsamtal, slutande krets eller spänning mellan 6V-15V och skickar signal till mottagare i samma serie. Mottagaren ger dig varseblivning via akustisk, visuell eller taktisk signal (beroende på vilken typ av mottagare du har).

Denna enhet kan användas som sändare för olika typer av larm och händelser, till exempel dörrklocka, porttelefon, telefon ir-detektor osv.


För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

## ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus.

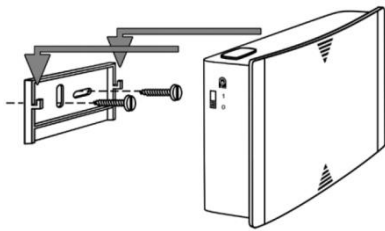

Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

## FELSÖKNING

*Fel*

Enheten fungerar inte

*Avhjälp*

Kontrollera om de batterier som sitter i är ok.

Kontrollera att rätt poler är positionerade för batterierna.

Testa använd nätaggregat om sådant finns.

Falsklarm

Kontrollera att rätt uttag har använts. Det ena uttaget larmar vid slutna krets det andra vid spänning.

Mottagaren registrerar ej

Kontrollera om enheterna är parade enligt anvisningar. Kontrollera koppling till extern produkt, tex porttelefon, har gjorts på korrekt sätt.

## ÅTERVINNING



Symbolen på produkten eller förpackningen indikerar att detta är en produkt som inte skall återvinnas på samma sätt som övrigt avfall från

hushållet utan skall istället lämnas till

återvinningsstation för elektronik. Genom korrekt återvinning skyddar du hälsa och miljön. Återvinning hjälper till att minska vår konsumtion av råvaror. Du kan få mer information från din återförsäljare.

TEKNISKA DATA	
Strömförsörjning:	3x AAA batterier 1,5v
	Eller
	230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
Höjd	75mm
Bredd	122mm
Djup	38mm
Vikt	128g (exkl. batterier)
Sändningsfrekvens	868,35MHz
Stand-by	1-2 år



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)