



signolux

TAKTIL MOTTAGARE

Bruksanvisning för Användare /Ordinatór / Förskrivare - Installatör


A-2619-0

Gratulerar till köpet av din "Signolux Taktilmottagare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.



För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

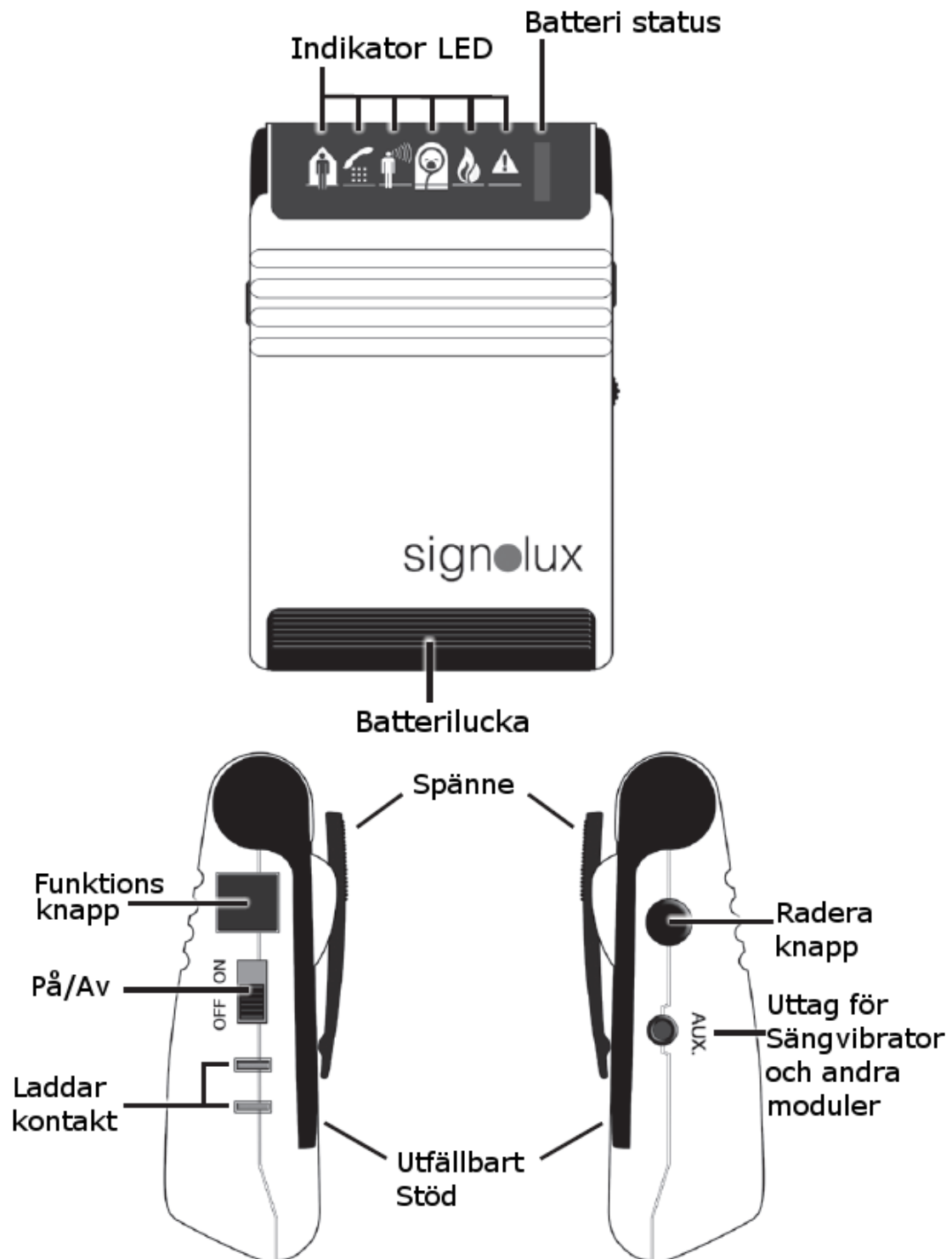

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Handenheten
- Bär-rem
- 2 st 1,5V AAA batterier
- Manual
- Garantikort

SPECIALTILLBEHÖR

- Sängvibrator
 - Blixtmodul MF-1
 - Modul MS-1
 - Akustisk modul MA-1
- Se separat manual för respektive tillbehör.

HANDHAVANDEBESKRIVNING

Att sätta i batteri

Det finns plats för batteri på undersidan av enheten. Öppna enheten genom att skjuta luckan på enheten bort från enheten. Placera två 1.5V AAA batterier och stäng luckan.

Sätta på enheten

Sätt på/av knappen på On. Mottagaren är nu påslagen. Efter det att enheten har satts på kommer batteri status LED lampan att lysa upp i cirka en sekund.

Para sändare med enheten

En sändare (som till exempel en dörrsändare) kan paras till en av enhetens symboler. Upp till 8 sändare kan kopplas till varje ikon på enheten. Vänligen ha i åtanke att en sändare kan endast paras med enheten om den inte redan är parat med sändaren för någon annan symbol. Om det behövs kan du ta bort sändaren från mottagens minne.”

- Håll funktionsknappen nedtryckt en tid. Symbolerna lysas upp

sekventiellt. Släpp knappen när önskad symbol lysas upp. (tex. Symbolen för dörr)

- Utlös signal för den sändare som skall paras med enheten (tex. Tryck på dörrsändare)
- Vänta i cirka 20 sekunder.

Att ta bort sändare från minnet

Om du önskar ta bort sändare från mottagarens minne gör du följande:

- Håll funktionsknappen nedtryckt en tid. Symbolerna kommer att lysa upp i sekvens. Släpp funktionsknappen när den önskade symbolen lyser.
- Tryck nu på funktionsknappen och radera knappen samtidigt. Alla symboler lysas upp samtidigt en kort stund.

Observera att samtliga sändare för den aktuella symbolen raderas från minnet.



Dörrklocka (grön)



Telefon (orange)



Personanrop (gul)



Babyalarm (vit)



Brand (röd)



Alarm (röd)

Att kontrollera senaste signal och bekräfta mottagen signal

Genom att trycka på funktionsknappen kan den senaste skickade signalen visas igen. Du kan också avbryta signal som just aktiveras genom att trycka på knappen.


Signal distinktion

De olika sändarna kan identifieras genom olika vibrationsmönster.


Dörrsymbol: LEDn lyser grönt



Telefon: LEDn lyser orange

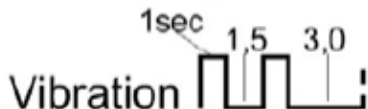

Personanrop: LEDn lyser gult

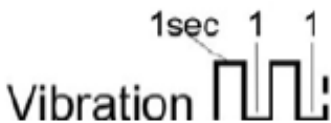

Babyalarm: LEDn lyser vitt



Brandlarm: LEDn lyser rött



Alarm: LEDn lyser rött



ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

LED-ljusen lyser upp i totalt 40 sekunder vid varseblivning.

Batteri indikeringen visar hur mycket batteri som finns kvar i enheten samt visar batteristatus för sändarna.

- God batterinivå indikeras genom att den röda kontrollampen blinkar var 5-6:e sekund.
- Låg batterinivå indikeras genom att den röda kontrollampen blinkar i kortare sekvens, cirka en gång i sekunden. Vänligen byt batterier så snart som möjligt.
- En låg batterinivå hos sändare indikeras av att den röda kontrollampen lyser tillsammans med symbolen för respektive sändare när signal är triggad. Vänligen byt batterier så snart som möjligt.

Funktionsknapp

När du känner att enheten vibrerar kan du stoppa vibrationen genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Vidare kan du trycka på funktionsknappen för att få påminnelse om vilken som var den senaste signalen. (denna funktion fungerar upp till 3 minuter efter mottagen signal). Funktionsknappen används också för att para mottagaren med sändare.

Spänne

Du kan använda spännet för att fästa mottagaren på ditt bälte eller dina kläder.

På/av-knapp

Använd denna knapp för att stänga av och sätta på mottagaren.

Radera knapp

Denna knapp används för att ta bort sändarenheter som är parade med enheten.

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Den portabla mottagaren tar emot signaler från de olika sändarna i "signolux-familjen" och förmedlar signalerna taktilt genom vibrationer. Det finns 6 olika LED ljus som signalerar vilken typ av sändare som har utlöst signal.

ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

ÅTERVINNING



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.

TEKNISK DATA

Räckvidd	cirka 200m
Ljudvolym	upp till 90dB på 1m
Batterier	2 st 1.5V AAA eller 1.2V laddningsbara
Batterier livslängd	cirka 800h med 1.5V alkaline batteri Cirka 300h med laddningsbara batterier
Vibration	Eccentrisk motor, olika vibrationsmönster för olika signaler
Dimensioner (HxWxD)	85*60*28 mm
Vikt	88 g



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.


www.humanteknik.se

LADDARE FÖR TAKTIL MOTTAGARE

Bruksanvisning för Användare / Ordinatör / Förskrivare - Installatör

A-2991-S

Gratulerar till köpet av din "Signolux Laddare för Taktilmottagare". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

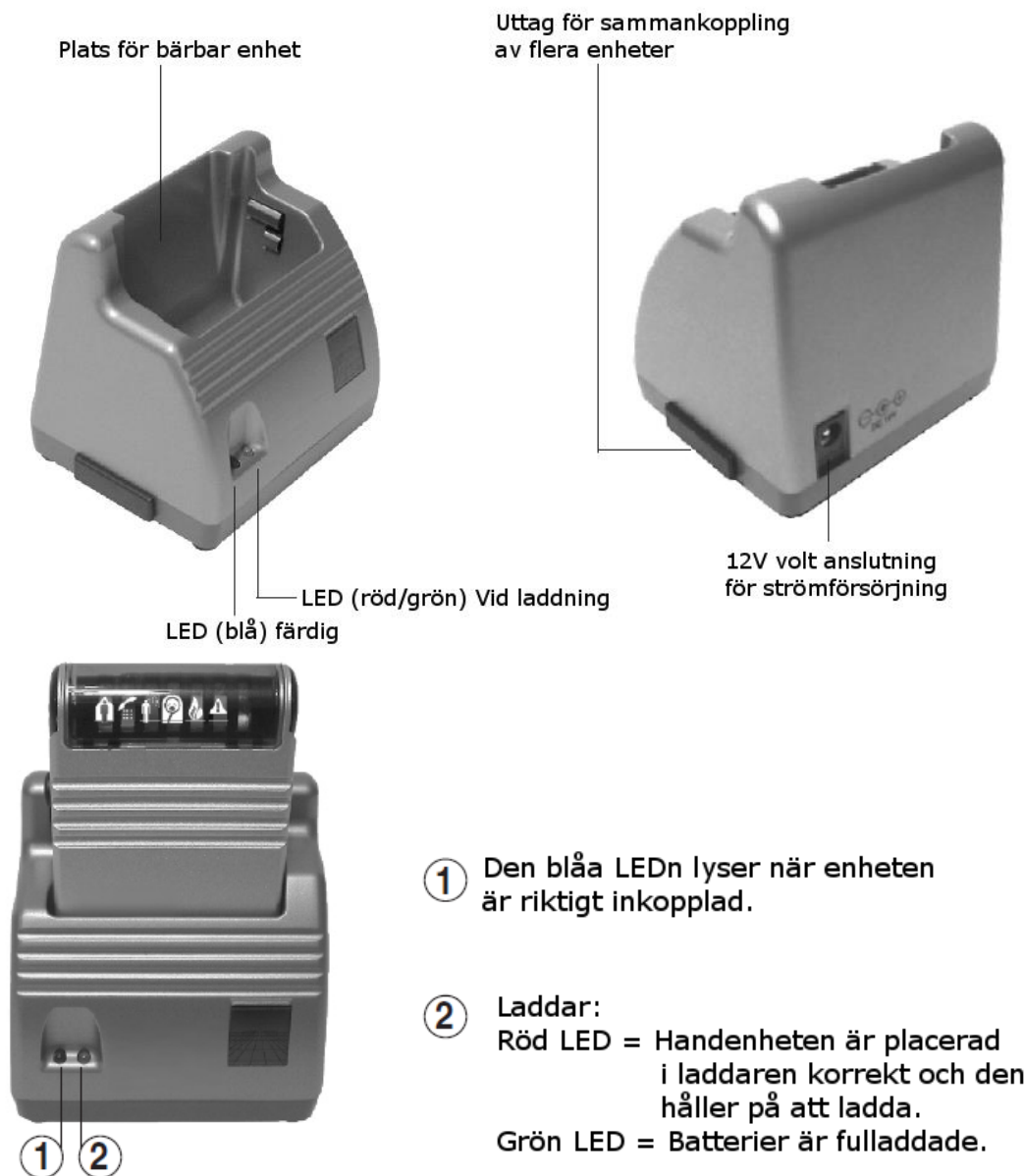

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Laddarenheten med sammankopplings tillbehör.
 - 2 x NiMH laddningsbara batterier* (typ AAA)
 - Strömförsörjnings adapter*
 - Manual
 - Garantikort
- *finns även som reservdelar

HANDHAVANDEBESKRIVNING

Så här kommer du igång och använda din enhet:

1. Ta bort de tidigare batterier du har haft i din bärbara taktila mottagare och ersätt dem med de batterier som du fick med leveransen av laddaren.
2. Anslut laddaren till strömförsörjningsadaptern genom att sätta den i vägguttag och i avsett uttag i laddaren.



Laddningsbara batterier

Till denna laddare medföljer det 2 st NiMH laddningsbara batterier. Om batterierna laddas på rätt sätt kommer de att ha en lång livstid.

Försäkra dig om att batterierna är placerade korrekt i din bärbara mottagare. Det finns LED indikator på laddaren som visar om batterierna är placerade korrekt.

Observera att batterierna inte är laddade vid leverans utan måste laddas fullt före användning första gången (minst 10h). Använd endast de medföljande uppladdningsbara batterierna i din bärbara enhet. Dessa finns också som tillbehör.

Sammankoppling av två laddare

1. Koppla ur strömförsörjningsadapter
2. Ta bort bryggningsfunktion under laddaren.
3. På den första laddaren, ta bort ett av de plastskydd som täcker över uttagen för sammankoppling.
4. Skruva fast säkerhetskruven i bryggningsbrickan genom botten på laddaren.
5. Ta bort plastskydd på motsatt sida på den andra laddaren.
6. Ställ den andra laddaren på bryggningsbrickan som sticker ut ut den första laddaren.
7. Tryck försiktigt fast den andra laddaren till den är i nivå med första laddaren.
8. Skruva fast säkerhetskruven i säkerhetsbryggan genom botten på den andra laddaren.
9. Sätt i en av laddningsbaserna i en strömuttag med den medföljande strömförsörjningsadaptern.

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Laddaren fungerar som en laddningsstation för den portabla varseblivningsmottagaren i signolux-serien. Laddaren har olika indikeringslampor som gör det lätt att se om du har placerat din handhållna enhet

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se

korrekt i laddaren, om den laddar och när den är färdigladdad.



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

TEKNISK DATA	
Strömförsörjning:	12V PSU till 110V, 50Hz
Visuella signaler	1 LED blå – Redo 1 LED röd/grön -Laddar
Dimensioner (HxBxD)	67x83x65mm

ÅTERVINNING



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.

För mer information besök vår hemsida.

www.humanteknik.se