



**cm**-BT2

br|ström

**SV**

**Användarmanual**

Sida 2

Kommunikationssystem  
Bluetooth Headset

Vi vill gratulera dig till ditt köp av CM-BT2 Blåtandsheadset. Du har köpt en modern kommunikationslösning av hög kvalitet. Vänligen läs igenom denna manual innan du börjar använda enheten. Manual förklarar hur du kommer igång och hur du använder alla olika funktioner.

## Innehåll

### Allmän information

Blåtandsteknologi	3
Förpackningsinnehåll	3

### Börja använda enheten

Beskrivning av enheten	4, 5
Ladda din CM-BT2	6
Ladda din CM-BT2 med nätadapter	6
Ladda din CM-BT2 med 12 V plug-in	6
Ladda din CM-BT2 via datorns USB	7
Användningstid för CM-BT2	7
Para din CM-BT2 med en telefon	8,9
Återanslut CM-BT2 med telefonen	10

### Grundläggande användande

Att ringa och motta samtal	10
Lyssna på musik från telefonen	10
Justera volym	11
Ansluta CM-BT2 till dator	12
Säkerhetskoppling på halsslingan	12

### Övrigt

Säkerhet	13
Underhåll	13
Miljöhänsyn	14
Garanti	14
Specifikation	15

## Allmän information

### Blåtandsteknik

Blåtand är en radioteknik som gör det möjligt att ansluta kompatibla enheter med varandra utan att använda kablar.

För att etablera en kontakt med blåtand är det inte nödvändigt att ha fri sikt mellan enheterna. Men avståndet mellan enheterna (telefonen och CM-BT2) kan inte överstiga tio meter. Föremål som en vägg eller andra elektroniska apparater kan störa överföringen och kan orsaka försämrad ljudkvalitet.

CM-BT2 headset följer standard för Blåtand specifikation 2.1 och stödjer följande profiler:

- Headset (HSP) med tal / musik
- Hands-free (HFP) trådlös telefoni
- Avancerad ljud distribution (A2DP) stereo hörlurar
- Audio/Video fjärrstyrning (AVRCP)

Kontakta tillverkaren av din telefon för att kontrollera om den är kompatibel med CM-BT2.

Observera att användande av Blåtand kan vara förbjudet i vissa miljöer.

### Förpackningsinnehåll


Kontrollera att följande finns med i din förpackning:

- CM-BT2 headset med halsslinga
- USB laddningskabel
- 12V plug-in laddare för bil
- Nätadapter
- Manual
- Garantikort

Kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt om något saknas.

## Börja använda enheten

Beskrivning av enheten.

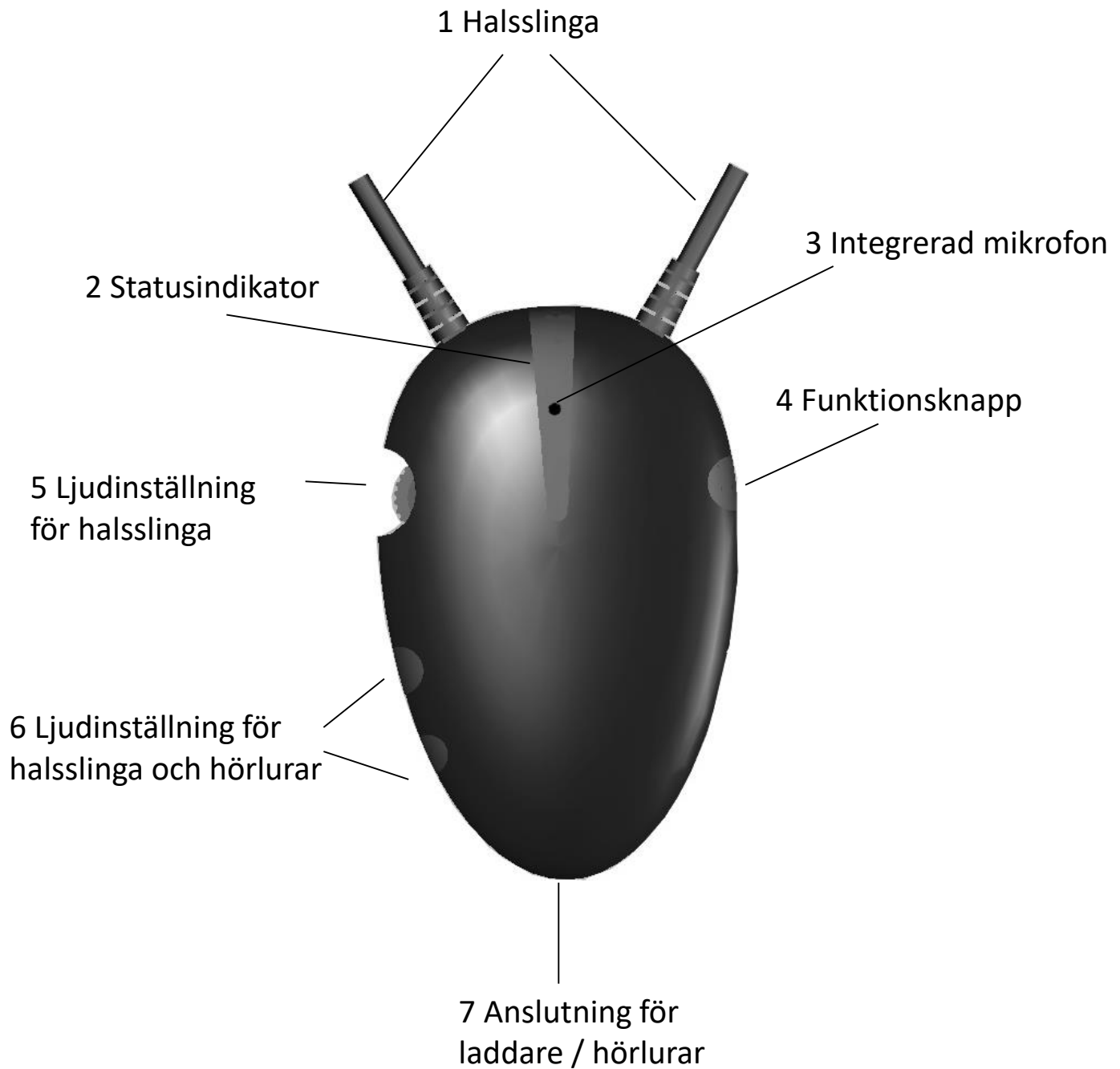

## 1 Halsslinga

## 2 Statusindikator

- Rött sken → CM-BT2 är avstängd
- Rött sken blinkar långsamt → Låg batterinivå
- Blått / Rött sken blinkar → Parningsläge
- Blått sken var 3:e sekund → Försöker ansluta
- Blått sken lyser var 5:e sekund → Är ansluten med enhet.

## 3 Integrerad mikrofon

### 4 Funktionsknapp

Stänger av och sätter på CM-BT2, on/off

Svara på inkommande samtal / avsluta pågående samtal

Parningsknapp

### 5 Ljudinställning för halsslinga

Volymen på halsslingan kan höjas separat genom att använda detta reglage.

### 6 Ljudinställning för halsslinga och hörlurar

Volymen på halsslinga och hörlurar kan justeras med dessa knappar.

### 7 Anslutning för laddar och hörlurar

Med detta 3.5mm uttag kan du koppla dina hörlurar eller ansluta med laddningskabel för CM-BT2.

## Ladda din CM-BT2


Din CM-BT2 har ett inbyggt laddningsbart lithium polymer batteri. Innan du använder enheten första gången rekommenderar vi att du laddar enheten.



Observera att enheten inte kan användas medans den laddar.

### Ladda din CM-BT2 med nätadapter

Anslut medföljande USB kabel till din CM-BT2 med nätadaptern och till laddningsuttaget 7. Anslut nätaggregatet till vägguttag-  
Enheten har laddat färdigt när statuslampan har slocknat.

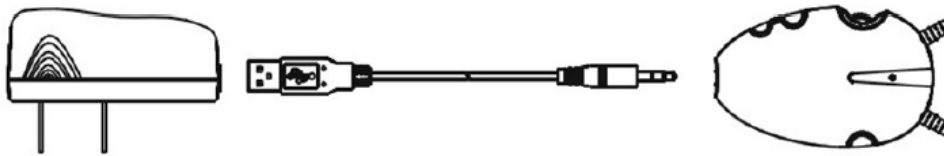

### Ladda din CM-BT2 med 12 V uttag för bil

Anslut medföljande USB kabel till din CM-BT2 till laddningsuttaget 7 och till 12 V uttag för bil. Anslut 12V till uttag i bil.  
Enheten har laddat färdigt när statuslampan har slocknat.



### **Ladda din CM-BT2 via datorns USB port**

Anslut medföljande USB sladd till din CM-BT2 via laddningsuttag t. Anslut USB kabeln till din dator. När enheten har laddat färdigt slocknar statuslampan.

### **CM-BT2 användningstid**


Vid normalt användande har CM-BT2 en taltid på 3 timmar och en standby tid på 120 timmar.

När batteriet behöver laddas, blinkar indikationslampan långsamt rött.

### Observera:

Användningstid är beroende på hur du använder din CM-BT2, hur högt ljudet är inställt och hur högt halsslingan är inställd.

Att ladda enheten kan ta längre tid om enheten har varit urladdad under lång tid.

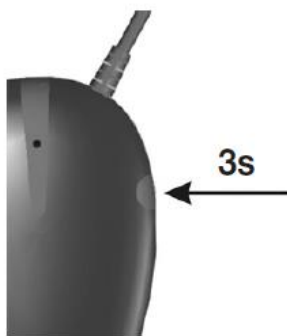


### Stänga av och sätta på din CM-BT2 on/off

Tryck på funktionsknappen i cirka 3 sekunder tills indikationslampan lyser blått. Hals slingan / hörlurarna avger en signal för att indikera att enheten nu är påslagen. Om det finns någon parat enhet i närheten kommer enheten automatisk att ansluta till den.

För att stänga av, tryck ner funktionsknappen, 4, i cirka tre sekunder tills indikationslampan lyser upp rött. Hals slingan / hörlurarna avger en signal för att indikera att enheten nu stängs av.

### Para CM-BT2 med en kompatibel telefon.

Innan du kan börja använda din CM-BT2 med telefonen, behöver den läggas till i din telefons lista över anslutna enheter. För att göra detta följ den manual som finns till din telefon som beskriver hur man ansluter blåtandsenheter.

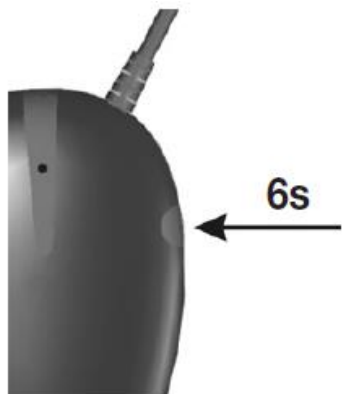

1. Starta telefonen

2. Tryck på funktionsknappen 4 på din CM-BT2 i ungefär 6 sekunder tills statuslampan blinkar blått och rött. Enheten är nu i parningsläge i 2 minuter.

3. Aktivera blåtandsfunktion på din telefon och sök efter enheten för att ansluta. Instruktioner för hur man gör på din telefon finns telefonens manual.

4. Välj enheten i listan i telefonen. Om nödvändigt fyll i lösenordet "0000" för att para enheten. Telefonen ansluter nu till CM-BT2.

5. Om enheten har lyckats paras med telefonen skall nu statuslampan blinka blått fyra gånger och en signal höras genom hals slingan / hörlurarna.



För vissa telefoner behöver man manuellt ansluta enheten för att den ska registreras i telefonen.

För mer information om hur man ansluter med din telefon hänvisar vi till din telefons manual. De behöver bara ansluta CM-BT2 en gång. Sedan kommer telefonen automatiskt ansluta.

CM-BT2 är ansluten till telefonen när den blå statuslampan lyser i 1 sekund var 5:e sekund.

CM-BT2 kommer synas i menyn på din telefon som visar alla anslutna blåtandsenheter.

### **Radera koppling mellan CM-BT2 och din telefon**

Gör följande för att ta bort kopplingen mellan din CM-BT2 och telefonen. (tex. Om du vill ansluta till annan blåtandsenhet till telefonen)

- Stäng av CM-BT2
- Avsluta kopplingen till CM-BT2 från din telefons blåtandsmeny
- Flytta CM-BT2 till en position mer än 10 meter från telefonen.

Observera: Du behöver inte ta bort CM-BT2 från din telefons lista över kompatibla enheter för att avsluta kopplingen.

## **Återanslut CM-BT2 till din telefon**

Statuslampan blinkar långsamt blått när enheten inte längre är ansluten till din telefon. Detta sker om avståndet mellan enheten och telefonen är för långt.

När CM-BT2 och din telefon är inom räckhåll kommer de att ansluta automatiskt eller genom att du trycker på funktionsknappen en gång. Statusindikatorn kommer att blinka i 1 sekund var 5e sekund och halsslingan / hörlurarna avge en signal när enheterna är återanslutna.

## **Grundfunktioner**

### **Ringa och ta emot samtal**


För att ringa ett samtal kontrollera att enheterna är parade.

Tryck på funktionsknappen 4 kort tryck.

För att avsluta samtal använd knapparna på telefonen eller tryck på funktionsknappen på CM-BT2.

### **Använd CM-BT2 som headset för att lyssna på musik**


Om din telefon kan spela upp musik kan du använda CM-BT2 för att lyssna på musik. När ett inkommande samtal detekteras kommer musiken att pausas och du kan trycka på funktionsknappen för att ta emot samtalet. Musiken fortsätter att spelas upp när du avslutat samtalet.

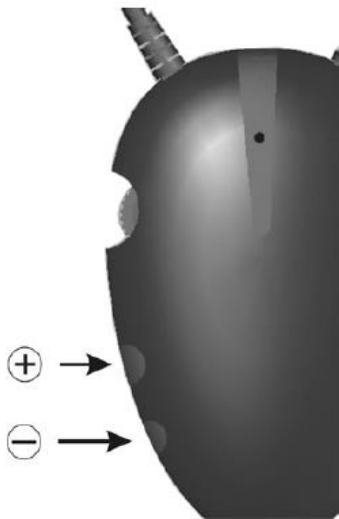

### Justera volymen

Tryck på + knappen vid volymknapparna 6 upprepade gånger för att höja volymen. Halslingen / hörlurarna avger en signal när maximal ljudnivå uppnåtts.

Tryck på – knappen vid volymknapparna 6 upprepade gånger för att sänka volymen. Halslingen / hörlurarna avger en signal när lägsta nivå uppnåtts.

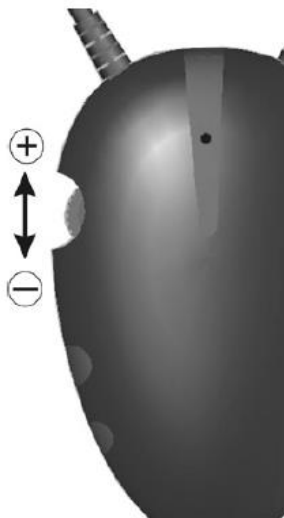

Med din CM-BT2 har du möjlighet till ytterligare inställning för ljud av din halsslinga. Vrid reglage för att ställa in ljud. Denna inställning påverkar inte hörlurarnas ljud utan endast halsslingans ljud




Innan du använder din CM-BT2 försäkra dig om att volymen är inställd på en behaglig nivå fr att inte skada din hörsel genom för högt ljud. Ställ alltid ljudet från en låg nivå.

## Anslut CM-BT2 till en kompatibel dator

1. Starta din dator och försäkra dig att datorn har möjligheter att ansluta till blåtandsenheter.
2. Tryck på funktionsknappen 4 på din CM-BT2 i cirka 6 sekunder tills den indikatorlampan blinkar blått / rött. Nu är enheten i parningsläge i 2 minuter.
3. Starta datorns mjukvara för att ansluta blåtand. Följ instruktionerna för din dator.
4. Välj CM-BT2 i listan över blåtandsenheter som datorn hittar. Om nödvändigt fyll i lösenord 0000 för att para enheten med din dator.
5. Om du lyckas para enheten med din dator kommer statuslampan att blinka fyra gånger snabbt och ett ljud höras i halsslingan / hörlurarna.

Vid problem med anslutning till din dator kontakta din återförsäljare av datorn.

## Säker halsslinga

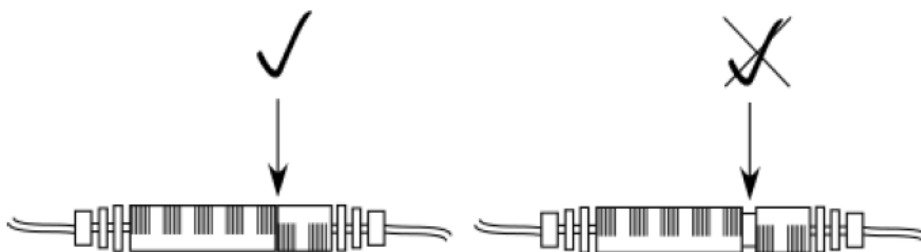

Försäkra dig om att halsslingan är korrekt ansluten.

## Övrigt

### Säkerhet

CM-BT2 har tagits fram med senaste teknik och högt säkerhetstänk.

Observera följande säkerhetsinstruktioner:

- Utsätt aldrig enheten för följande:
  - Hetta
  - Direkt soljus
  - Fukt
- Skydda enheten mot direkt kontakt med vatten, damm, korrosiva vätskor, ånga.
- Använd endast medföljande utrustning för att ladda. Följ anvisningarna.
- Det är inte tillåtet att göra förändringar i kommunikationssystemet.
- Enheten innehåller små delar som kan svälja. Enheten skall inte användas av barn under 3 år.

Tillverkaren eller dess återförsäljare kan inte hållas ansvariga för skada som uppstått på grund av felaktigt användande av enheten.

### Underhåll

CM-BT2 headset kräver inget direkt underhåll. Om enheten blir smutsig kan den torkas ren med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte alkoholbaserat, thinner eller andra organiska lösningsmedel.

Placera inte enheten på så sätt att den under långa perioder utsätts för kraftigt solljus.

Skydda enheten mot hetta, fukt och kraftiga slag och stötar.

**Observera:** Denna enhet är inte skyddad mot väta. Placera den inte i närheten av vattenbehållare som vaser eller liknande. Placera den inte i närheten av öppen eld.



**Återvinning** av elektrisk apparatur (tillämpbara bestämmelser för länder inom Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem). Symbolen på produkten eller förpackningen indikerar att produkten inte skall hanteras som vanligt hushållsavfall utan skall lämnas in till återvinning.

Du skyddar miljön och hälsan hos människor genom att återvinna denna produkt på rätt sätt. Miljö och hälsa hotas av felaktig återvinning. Korrekt återvinning minskar konsumtion av råmaterial. Du kan få mer information om återvinning från din kommun eller återförsäljare.



### **Laddningsbara batterier**

Laddningsbara batterier som ingår i denna enhet kan återvinnas. Lämnna enheten till återvinningscentral eller till återförsäljare för korrekt återvinning.

### **Garanti**

Denna produkt är säker att använda och har hög driftsäkerhet. Skulle något fel uppstå trots att instruktioner i denna manual följts så kontaktar du din återförsäljare. Garantin täcker reparation och frakt. Det är viktigt att du sänder produkten i originalförpackning, så släng inte förpackningen. Garantin gäller inte om enheten har använts på felaktigt sätt eller om någon obehörig har försökt laga enheten så att säkerhetsgillet brutits. Reparationer utförs under garantitiden om kvitto kan uppvisas. **Specificera alltid produktens nummer i kommunikation med återförsäljare.**

## Teknisk specifikation:

Modell namn:	CM-BT2 headset
Blåtands version:	Bluetooth Specification Version 2.1
Frekvensband:	2.4 Ghz ISM Spectrum Frequency hopping 79 channels
Modulation:	GFSK (Gaussian Frequency Shifting Keying) Hands-free (HFP) talk / music output Avanced Audio Distribution (A2DP) stereo
Headset	Audio / Video Remote Control (AVRCP)
Räckvidd:	10m
Standby tid:	upp till 120 timmar
Taltid:	upp till 13 timmar med hörlurar
Laddningstid:	3 timmar
Vikt:	49 gram
Dimensioner:	48mm * 76 mm



Denna telefonenhet följer följande EU direktiv:

- 2002/95/EG RoHS direktiv
- 2002/96/EG WEEE direktiv
- 1999/5/EG R&TTE direktiv
- 2004/108/EG EMC direktiv
- 2006/95/EG Svagströms direktiv

CE märkning ovan bekräftas med märkning på enheten.

CE överensstämmelse dokument finns tillgängliga på

[www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com)

[www.humantechnik.se](http://www.humantechnik.se)