



signolux

## PAGER WRISTBAND

A-2619-W


Bruksanvisning

**Gratulerar till köpet av din "Signolux Pager Wristband". Du har valt Signolux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.**



För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

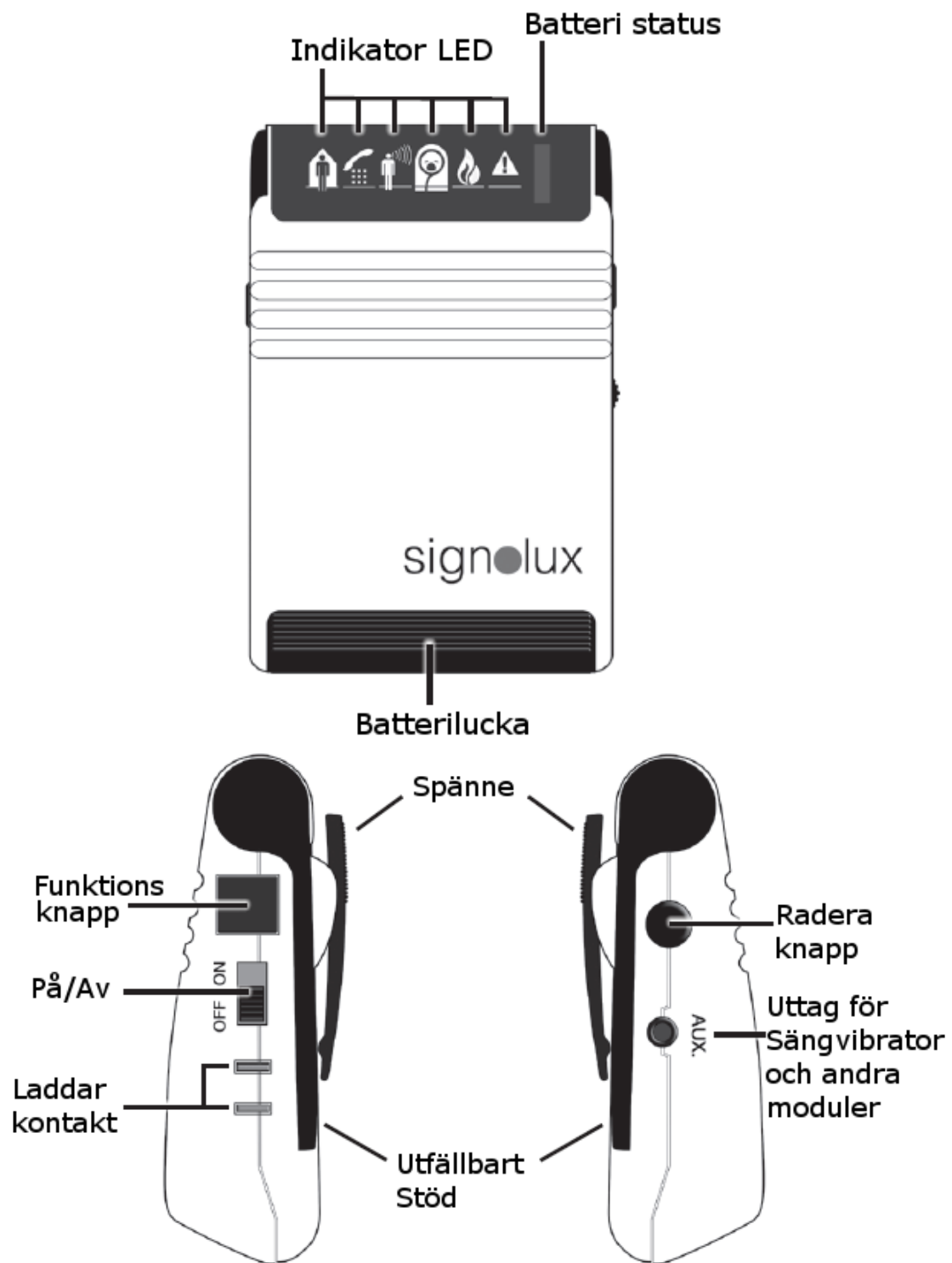

## DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:

- Handenheten
- Bär-rem
- Armband i velcro
- 2 st 1,5V AAA batterier
- Manual
- Garantikort

## SPECIALTILLBEHÖR

- Sängvibrator
- Blixtmodul MF-1
- Modul MS-1
- Akustisk modul MA-1

## HANDHAVANDEBESKRIVNING

### *Att sätta i batteri*

Det finns plats för batteri på undersidan av enheten. Öppna enheten genom att skjuta luckan på enheten bort från enheten. Placera två 1.5V AAA batterier och stäng luckan.

### *Sätta på enheten*

Sätt på/av knappen på On. Mottagaren är nu påslagen. Efter det att enheten har satts på kommer batteri status LED lampan att lysa upp i cirka en sekund.

### *Para sändare med enheten*

En sändare (som till exempel en dörrsändare) kan paras till en av enhetens symboler. Upp till 8 sändare kan kopplas till varje ikon på enheten. Vänligen ha i åtanke att en sändare kan endast paras med enheten om den inte redan är parat med sändaren för någon annan symbol. Om det behövs kan du ta bort sändaren från mottagens minne.”

- Håll funktionsknappen nedtryckt en tid. Symbolerna lysas upp sekventiellt. Släpp knappen när

önskad symbol lysas upp. (tex. Symbolen för dörr)

- Utlös signal för den sändare som skall paras med enheten ( tex. Tryck på dörrsändare)
- Vänta i cirka 20 sekunder.

### *Att ta bort sändare från minnet*

Om du önskar ta bort sändare från mottagarens minne gör du följande:

- Håll funktionsknappen nedtryckt en tid. Symbolerna kommer att lysa upp i sekvens. Släpp funktionsknappen när den önskade symbolen lyser.
- Tryck nu på funktionsknappen och radera knappen samtidigt. Alla symboler lysar upp samtidigt en kort stund.

**Observera att samtliga sändare för den aktuella symbolen raderas från minnet.**



Dörrklocka (grön)



Telefon (orange)



Personanrop (gul)



Babyalarm (vit)



Brand (röd)



Alarm (röd)

*Att kontrollera senaste signal och bekräfta mottagen signal*

Genom att trycka på funktionsknappen kan den senaste skickade signalen visas igen.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

Du kan också avbryta signal som just aktiveras genom att trycka på knappen.


#### Signal distinktion

De olika sändarna kan identifieras genom olika vibrationsmönster.


**Dörrsymbol:** LEDn lyser grönt




**Telefon:** LEDn lyser orange

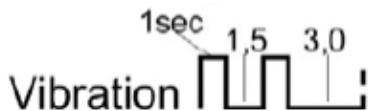

**Personanrop:** LEDn lyser gult

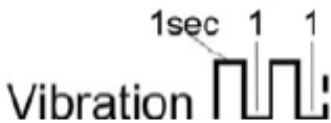

**Babyalarm:** LEDn lyser vitt

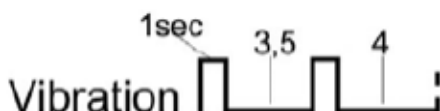

**Brandlarm:** LEDn lyser rött



**Alarm:** LEDn lyser rött



#### ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

LED-ljusen lyser upp i totalt 40 sekunder vid varseblivning.

Batteri indikeringen visar hur mycket batteri som finns kvar i enheten samt visar batteristatus för sändarna.

- God batterinivå indikeras genom att den röda kontrollampan blinkar var 5-6:e sekund.
- Låg batterinivå indikeras genom att den röda kontrollampan blinkar i kortare sekvens, cirka en gång i sekunden. Vänligen byt batterier så snart som möjligt.
- En låg batterinivå hos sändare indikeras av att den röda kontrollampan lyser tillsammans med symbolen för respektive sändare när signal är triggad. Vänligen byt batterier så snart som möjligt.

#### Funktionsknapp

När du känner att enheten vibrerar kan du stoppa vibrationen genom att trycka på funktionsknappen på mottagaren. Vidare kan du trycka på funktionsknappen för att få påminnelse om vilken som var den senaste signalen. (denna funktion fungerar upp till 3 minuter efter mottagen signal). Funktionsknappen används också för att para mottagaren med sändare.

#### Spänne

Du kan använda spännet för att fästa mottagaren på ditt bälte eller dina kläder. Du kan även använda spännet för att fästa det i det medföljande armbandet. Se till att först fästa armbandet ordentligt innan du fäster enheten i det.

#### På/av-knapp

Använd denna knapp för att stänga av och sätta på mottagaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

### *Radera knapp*

Denna knapp används för att ta bort sändarenheter som är parade med enheten.

den måste lämnas på återvinningsstation för elektroniskt skrot. Genom att göra så skyddar du miljön och hälsa. Korrekt återvinning hjälper till att bevara miljön och minska användning av råmaterial. Du kan få ytterligare information om miljö och återvinning från din återförsäljare.

### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Mottagaren tar emot signaler från de olika sändarna i "signolux-familjen" och förmedlar signalerna taktilt genom vibrationer. Det finns 6 olika LED ljus som signalerar vilken typ av sändare som har utlöst signal.

### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa. Använd aldrig starka rengöringsmedel på enheten. Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

### **ÅTERVINNING**



Symbolen på produkten visar att det är en produkt som inte skall slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall utan att

FEL	ORSAK	LÖSNING
Mottagaren reagerar inte på signal från sändaren	Slut på batterier	Ladda batteriet eller sätt i nytt batteri
	Batterierna är i fel placerade.	Kontrollera om batterierna sitter rätt i enheten.
	Sändaren fungerar inte	Kontrollera felsökning schema för sändaren.
Det går inte att para enheten med sändare	Slut på batterier	Kontrollera batterierna i båda enheterna.
	Sändaren är redan parad med mottagaren för någon annan symbol	Radera minnet för den aktuella ikonen, se ovan, och försök para enheterna på nytt.

För mer information besök vår hemsida.



TEKNISK DATA

Räckvidd	cirka 200m
Ljudvolym	upp till 90dB på 1m
Batterier	2 st 1.5V AAA eller 1.2V laddningsbara
Batterier livslängd	cirka 800h med 1.5V alkaline batteri Cirka 300h med laddningsbara batterier
Vibration	Eccentrisk motor, olika vibrationsmönster för olika signaler
Dimensioner (HxWxD)	85*60*28 mm
Vikt	88 g



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklARATION och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)